


Elektrische steunkousuittrekker

Mobiliteitsklasse

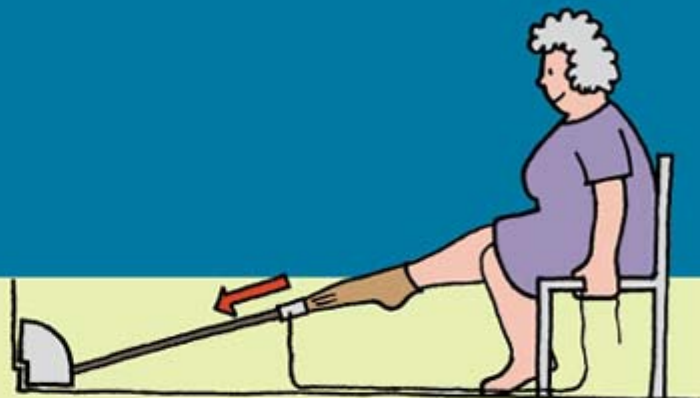

Omschrijving

Hulpmiddel om zelfstandig therapeutische elastische kousen uit te trekken met behulp van een elektromotor. Dit is een nieuw hulpmiddel dat recent is ontwikkeld.

Voorlopige verpleegkundige indicatiestelling

Wanneer de cliënt in staat is om zelfstandig stabiel en stevig te zitten, de knop van het hulpmiddel zelfstandig te verbinden aan de kous en over een redelijk tot goede coördinatie beschikt is dit een geschikt hulpmiddel dat kan leiden tot zelfstandig gebruik, het ondervangen van een zorgvraag en zodoende afname van fysieke belasting voor de zorgverlener.

Het is ook voor cliënten met één goed functionerende arm mogelijk om van dit hulpmiddel gebruik te maken. Wel zal de cliënt zijn been enigszins naar voren moeten kunnen strekken.

Gebruiksbeperkingen

Voor de zorgverlener: geen. Wanneer assistentie nodig is bij het aanbrengen van de knop moet voorkomen worden dat er langdurig gebukt of gehurkt wordt.

Voor de cliënt: zie beperkingen genoemd bij de verpleegkundige indicatiestelling. Verder is een goede instructie noodzakelijk en is er enige handigheid nodig. De cliënt moet dus

de kans krijgen om aan het apparaat te wennen. Ga ook daadwerkelijk na of de cliënt de handeling goed beheerst en begrijpt, alvorens je de cliënt het apparaat zelfstandig en zonder toezicht laat gebruiken.

De maximumkracht waarmee het apparaat trekt is instelbaar. Ga na of deze kracht niet te hoog is ingesteld/licht voor de betreffende cliënt en zijn of haar kousen.

Het uitzoeken van een goede en veilige plek in huis met een stevige stoel met bij voorkeur armleuningen en niet te gladde vloerbedekking is eveneens belangrijk.

Laat de cliënt met het koordje van de handbediening ook de knop oppakken. Dat voorkomt diep bukken en mogelijk vallen.

Om valpartijen te voorkomen moet erop gelet worden dat de band met de knop en de bediening niet op de vloer slingeren.

Tip

- Het werkt het makkelijkst om de knop goed aan de achterzijde van de kuit te bevestigen.